



STREAM LINE TV

StreamLine TV est la solution la plus simple et pratique pour profiter de vos programmes TV avec votre famille. En effet, le StreamLine TV permet aux utilisateurs d'aides auditives de recevoir directement le son de la télévision dans les oreilles, en stéréo, et s'ils sont plusieurs, ils peuvent appairer leurs aides auditives Signia avec un seul StreamLine TV en même temps.

Depuis votre smartphone, grâce à l'application myControl, vous pouvez facilement démarrer et mettre en pause le streaming de votre TV et régler le volume comme vous le souhaitez.

Compatible avec le StreamLine Mic

Compatible avec l'utilisation simultanée de StreamLine Mic pour encore plus de connectivité ! En effet, avec le StreamLine TV vous pouvez gérer vos appels téléphoniques, en kit mains libres depuis votre smartphone, tout en regardant la télévision qui sera automatiquement coupée.

Entièrement automatique, appairez facilement le StreamLine TV avec vos aides auditives en trois étapes :

1. Allumez votre StreamLine TV
2. Éteignez et rallumez vos aides auditives
3. Placez vos aides auditives sur votre StreamLine TV

Le processus d'appairage démarre automatiquement. Dès lors que l'appairage est en cours, les deux témoins lumineux deviennent bleus pendant environ 30 secondes. L'appairage ne doit se faire qu'une seule fois. **Le StreamLine TV peut être appairé à plusieurs aides auditives.**

StreamLine TV est compatible avec tous les téléviseurs équipés des connexions suivantes :

1. Câble TOSLINK (optique / numérique)
2. Câble Cinch (RCA / analogique)
3. Adaptateur jack

