

DEX™





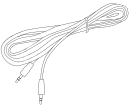
A WIRELESS WORLD

MODE D'EMPLOI

M-DEX

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

CONTENU

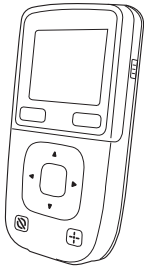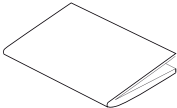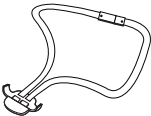M-DEX	
Mode d'emploi	
Cordon	
Chargeur	
Câble jack/jack	

SOMMAIRE

LES SYMBOLES	5
VOTRE NOUVEAU M-DEX	6
USAGE AUQUEL CET APPAREIL EST DESTINE.....	6
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	6
VUE D'ENSEMBLE DU M-DEX	7
LES ICONES D'ETAT	8
ETAT DE LA BATTERIE	8
BLUETOOTH	8
PIÈCE ARRÊT	9
LES PORTEES DE FONCTIONNEMENT	9
UTILISATION DU CORDON	10
POUR DEMARRER	11
CHARGEMENT DE LA BATTERIE.....	11
COMMENT ALLUMER LE M-DEX ?	13
COMMENT ETEINDRE LE M-DEX ?	14
ECRAN DE VEILLE	15
VERROUILLAGE MANUEL DES TOUCHES	16
FONCTIONNALITES DE BASE - RADIOCOMMANDE	17
CHANGEMENT DE PROGRAMME	17
COMMENT REGLER LE VOLUME ?	19
CHOISIR DE FOCALISER SUR CE QUE VOUS VOULEZ ECOUTER.....	20
PIÈCE ARRÊT.....	23

FONCTIONNALITES DE BASE – TELEPHONE PORTABLE. . . .	24
APPAIRAGE DE M-DEX AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE	24
CONVERSATION SUR LE TELEPHONE PORTABLE VIA LE M-DEX.	28
ACCEPTER OU REJETER L'APPEL.	29
TERMINER L'APPEL	30
APPELER	30
UTILISER LA LISTE D'APPELS POUR APPELER.	30
TRANSFÉRER L'APPEL	31
FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES.	32
AUTRES FONCTIONS	33
COMMENT REGLER LE VOLUME ?	33
PIÈCE ARRÊT.	33
FONCTIONNALITES AVANCÉES	34
BLUETOOTH	35
ENTRÉE AUDIO.	37
VOLUME D/G.	39
M-DEX T	41
LES RÉGLAGES.	43
RÉINITIALISER.	49
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT.	50
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE M-DEX ?	53
AVERTISSEMENT.	55
AVERTISSEMENT DE SECURITE	56
REGULATORY INFORMATION	57

LES SYMBOLES

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez les symboles suivants :


 AVERTISSEMENT

Les messages commençant par cet intitulé indiquent des réactions indésirables, des risques potentiels de danger ou une performance inadéquate de l'appareil.

 MISE EN GARDE

Les messages commençant par cet intitulé vous informe sur une précaution toute particulière à prendre.



 Jeter seulement dans une poubelle de tri sélectif adaptée

VOTRE NOUVEAU M-DEX

Votre M-DEX fait partie de la gamme DEX™, appareils auxiliaires d'aide à l'écoute. Ce mode d'emploi vous explique comment faire fonctionner le M-DEX.



AVERTISSEMENT

Ce livret contient des informations et des instructions importantes. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

USAGE AUQUEL CET APPAREIL EST DESTINE


Le M-DEX est un appareil sans fil, prévu pour des applications de téléphonie cellulaire. Il peut être utilisé comme radiocommande avancée.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

M-DEX est une radiocommande avancée pour aide auditive. M-DEX transmet les conversations des téléphones portables directement dans l'aide auditive. Il permet à l'utilisateur de contrôler les fonctionnalités normales du téléphone portable et l'entrée audio en utilisant une connexion Bluetooth. M-DEX est compatible avec la majorité des modèles de téléphones portables, et avec WidexLink pour la connexion aux aides auditives Widex.

VUE D'ENSEMBLE DU M-DEX

1. Marche/Arrêt
2. Oui (vert)
3. Non (rouge)
4. Hausse du volume
5. Baisse du volume
6. Précédent
7. Suivant
8. Menu
9. Pièce arrêt
10. Zoom libre
11. Microphone

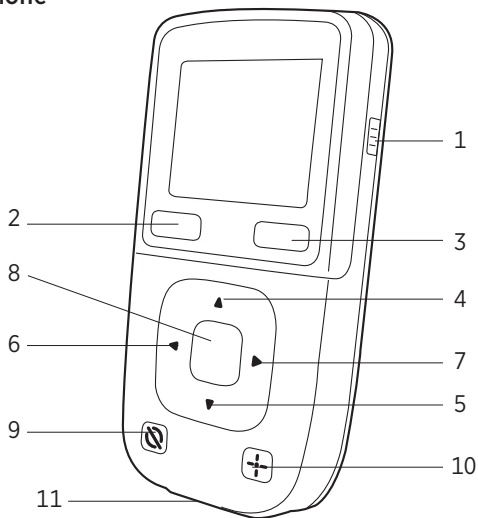


LES ICONES D'ETAT


Lorsque le M-DEX est allumé, vous pouvez voir l'état de la batterie, de la connexion Bluetooth et de la fonction Pièce arrêt en haut à droite de l'écran de démarrage.

ETAT DE LA BATTERIE

Pleine

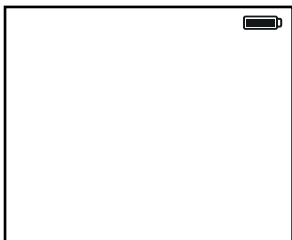


Faible

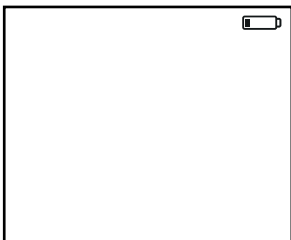


BLUETOOTH

(bleu = connecté, gris = activé (mais non connecté),
icône non visible = arrêté)

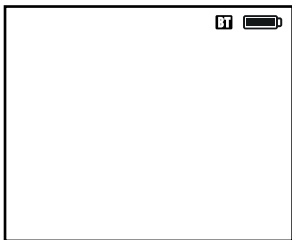

PIÈCE ARRÊT

(L'icône s'affiche uniquement si la fonctionnalité est active).




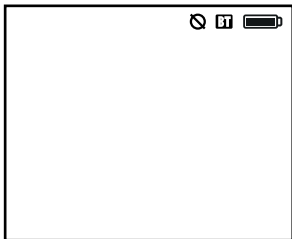


LES PORTEES DE FONCTIONNEMENT

De M-DEX aux aides auditives	
Lorsque vous l'utilisez comme une radio-commande	jusqu'à 1 mètre
Avec des téléphones portables, Bluetooth et l'entrée audio transmise, y compris M-DEX T	jusqu'à 50 cm
Du M-DEX au téléphone portable	
	jusqu'à 10 mètres

UTILISATION DU CORDON

Si vous voulez porter le M-DEX autour du cou, placez-le dans le support en plastique à l'extrémité du cordon, comme sur l'illustration.

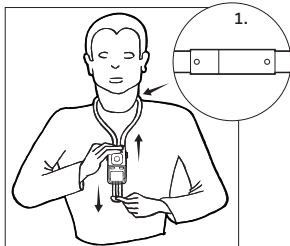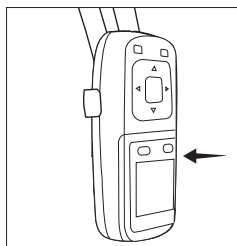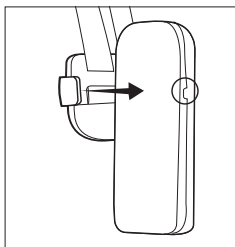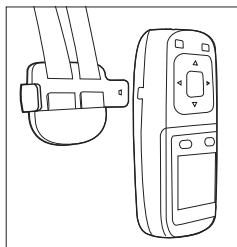


AVERTISSEMENT

La boucle de fermeture sur le cordon doit être positionnée sur votre nuque (1) pour faciliter l'ouverture.

POUR DEMARRER

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le M-DEX utilise une batterie rechargeable. Lorsqu'elle est totalement chargée, la batterie a une autonomie d'environ 5 heures d'utilisation continue. Lorsque l'appareil est en veille, l'autonomie de la batterie est d'environ trois jours. Si le Bluetooth est activé, cette période sera considérablement réduite. Le chargeur est disponible en quatre versions. La version que vous possédez n'est par conséquent peut-être pas identique à ce qui est illustré dans ce mode d'emploi.

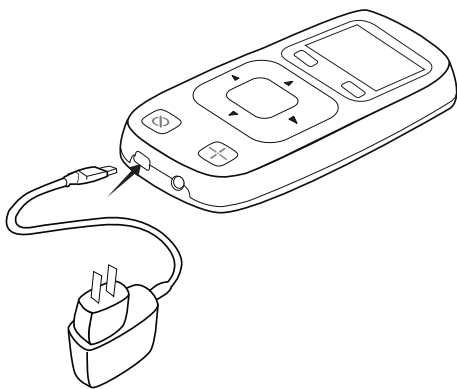

Pour charger la batterie

1. Connectez le chargeur au M-DEX.
2. Branchez le chargeur sur une prise murale.

Il faut environ 6 heures pour la première charge de la batterie. Laissez la batterie en charge pendant six heures même si l'icône « batterie pleine » apparaît.

Une recharge dure environ 3 heures selon que l'appareil est allumé ou non.




AVERTISSEMENT

Ne changez pas la batterie vous-même. Veuillez contacter votre audioprothésiste si la batterie a besoin d'être remplacée.

COMMENT ALLUMER LE M-DEX ?

Poussez le bouton poussoir sur la droite de l'appareil vers le haut.

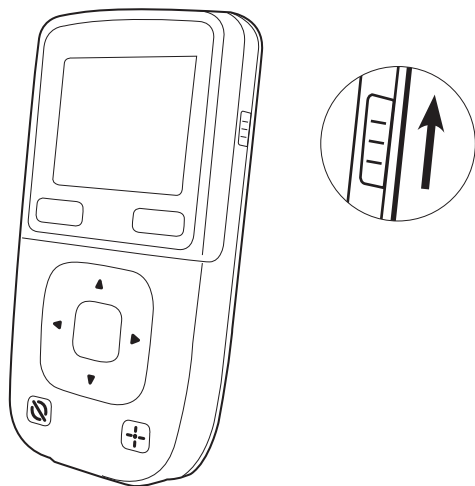

Remarque

Les icônes et les écrans de votre M-DEX dépendront de la façon dont vous l'avez configuré vous et votre audioprothésiste. Votre audioprothésiste devra appairer le M-DEX à vos aides auditives. Lorsque cela sera fait, vous pourrez changer de programme et régler le volume de vos aides auditives.

Le programme en position numéro 1 (généralement le programme principal) s'affiche.



COMMENT ÉTEINDRE LE M-DEX ?



Pour éteindre le M-DEX
Poussez le bouton pous-
soir sur la droite du M-DEX
vers le bas.

ECRAN DE VEILLE


Pour économiser de l'énergie, l'écran du M-DEX entrera automatiquement en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant 10 secondes.

Pour quitter le mode veille

Utilisez n'importe quelle touche sauf la touche marche/arrêt. Si les autres touches sont verrouillées, vous pouvez utiliser la touche « Non » pour quitter le mode veille.

VERROUILLAGE MANUEL DES TOUCHES

Vous pouvez activer le verrouillage des touches depuis n'importe quel écran de programme.

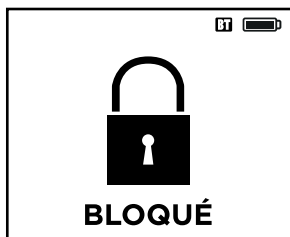

Pour activer le verrouillage des touches
Appuyez sur **Non** → **Menu**



Pour désactiver le verrouillage des touches
Appuyez sur **Non** → **Menu**

Si vous voulez des informations sur le verrouillage automatique des touches, voir page 45.

FONCTIONNALITES DE BASE - RADIOCOMMANDE

Depuis l'écran de départ, vous pouvez changer les programmes de votre aide auditive, régler le volume, choisir de focaliser sur ce que vous voulez écouter et activer/désactiver la fonction Pièce arrêt.

Votre aide auditive produira des messages vocaux ou des bips lorsque vous changerez les réglages (sauf lorsque vous utiliserez la fonction Pièce arrêt), à moins que la fonction ait été désactivée par votre audioprothésiste.

Si une marque s'affiche, cela signifie que la fonction spécifique a été activée.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

La sélection des programmes d'écoute de votre M-DEX dépend des programmes et du nombre de programmes que vous avez choisis d'avoir dans votre aide auditive. L'ordre des programmes est le même que dans votre aide auditive.

Le M-DEX démarre toujours par le programme qui a été choisi comme programme numéro 1 par vous et votre audioprothésiste (généralement le programme Principal).



Pour naviguer entre les programmes disponibles

Appuyez sur ◀ ou sur ▶

Chaque fois que vous appuyez sur une des flèches, une icône représentant le programme actif s'affiche.

COMMENT REGLER LE VOLUME ?



Pour accéder aux barres de volume

Appuyez sur ▲ ou sur ▼

Pour augmenter ou diminuer le volume dans les deux aides auditives

Appuyez sur ▲ ou sur ▼

Le réglage du volume ne s'appliquera qu'au programme d'écoute qui est actuellement actif.

La barre plus large au milieu indique le réglage par défaut. L'icône affichée reflète le nombre d'intervalles pour le réglage du volume que vous aurez choisi en collaboration avec votre audioprothésiste.

Le réglage binaural du volume se ferme automatiquement après quelques secondes. Pour le fermer manuellement, appuyez sur la touche **Non**.

Le fait de changer de programme ou d'éteindre le M-DEX annulera tout réglage de volume.

Si vous réglez le volume sur le contrôle du volume de l'aide auditive, ce réglage ne sera pas copié dans le M-DEX.


Pour régler le volume de vos deux aides auditives séparément, voir « Fonctionnalités avancées ».

CHOISIR DE FOCALISER SUR CE QUE VOUS VOULEZ ECOUTER

La fonctionnalité Zoom libre vous permet de focaliser sur un son provenant d'une direction spécifique avec vos aides auditives.


Appuyez sur la touche **Zoom libre**.

La touche Zoom libre s'allume pour indiquer que le Zoom libre est activé.

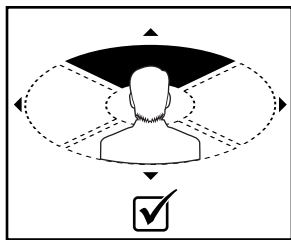


Pour focaliser sur un son provenant de devant

Appuyez sur ▲ → Menu

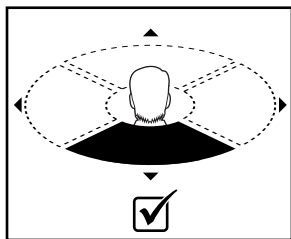


Pour focaliser sur un son provenant de derrière

Appuyez sur ▼ → Menu

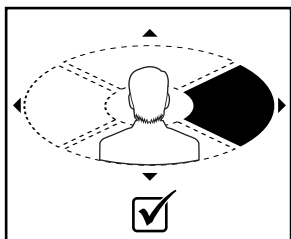

Pour focaliser sur un son
provenant de la droite

Appuyez sur ► → Menu

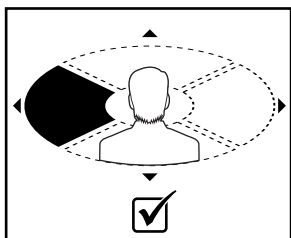

Pour focaliser sur un son
provenant de la gauche

Appuyez sur ◀ → Menu

Lorsque vous choisissez un réglage et que vous le verrouillez en appuyant sur **Menu**, une marque confirme votre choix. Vous pouvez “déverrouiller” votre choix en appuyant de nouveau sur **Menu**.

Pour régler le volume dans Zoom libre


Tout d'abord, choisissez la direction vers laquelle vous souhaitez focaliser, puis verrouillez le réglage. Utilisez ensuite la même procédure que pour les programmes d'écoute de l'aide auditive.

Pour désactiver Zoom libre

Appuyez sur la touche **Zoom libre**

PIÈCE ARRÊT

Lorsque vous activez la fonction 'Pièce arrêt', vous éteignez les microphones de l'aide auditive. Cela vous permet d'utiliser la fonctionnalité soit pour écouter directement le son audio transmis sans interférence des sons environnants, soit comme fonction de veille avec vos programmes d'écoute normaux (ex. Principal).

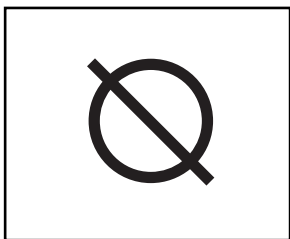

Pour activer Pièce arrêt

Appuyez sur la touche **Pièce arrêt**.

La touche Pièce arrêt s'allume et l'icône Pièce arrêt s'affiche.

Pour désactiver Pièce arrêt


Appuyez de nouveau sur la touche **Pièce arrêt**

FONCTIONNALITES DE BASE – TELEPHONE PORTABLE


APPAIRAGE DE M-DEX AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE

Lorsque vous utiliserez le M-DEX avec votre téléphone portable pour la première fois, vous devrez appairer les deux appareils.

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
2. Activez le Bluetooth sur votre M-DEX. Pour ce faire :
 - 2a. Appuyez sur la touche **Menu** depuis n'importe quel écran de programme. Cet écran s'affiche.

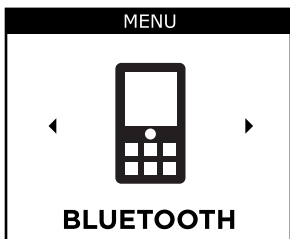

2b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ jusqu'à ce que vous atteigniez Réglages.

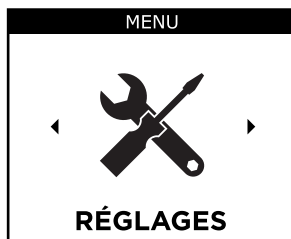

Appuyez sur **Menu** → **Menu**.

Si le Bluetooth n'est pas déjà activé, cet écran s'affichera.



2c. Appuyez sur la touche **Menu** pour activer Bluetooth. Cet écran s'affiche.



3. Sur votre téléphone portable, recherchez de nouveaux appareils. Pour ce faire, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone.

4. Lorsque vous aurez trouvé le M-DEX sur votre téléphone portable, apparez les deux appareils. Pour ce faire :



- 4a. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour aller à l'appairage
- 4b. Appuyez sur la touche **Menu**
- 4c. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu** pour démarrer l'appairage. Vous pouvez suivre la progression sur l'écran.
5. Sélectionnez le M-DEX sur votre téléphone, puis entrez le code pin (0000) affiché sur votre M-DEX dans votre téléphone si demandé.

Les appareils sont désormais appairés.

Si aucun appareil n'est détecté, « Appareil non détecté. Essayer de nouveau ? » s'affichera sur votre M-DEX.

REMARQUE

La prochaine fois que vous voudrez utiliser M-DEX avec votre téléphone portable, vérifiez que le Bluetooth est activé dans les deux appareils. Veuillez noter que l'utilisation des appareils avec le Bluetooth activé augmentera la consommation de la pile.

CONVERSATION SUR LE TELEPHONE PORTABLE VIA LE M-DEX

Tenez le M-DEX comme vous tiendriez un téléphone et parlez dans le microphone. Vous entendrez le son dans les deux aides auditives. Votre téléphone portable doit se trouver dans un rayon de 10 m.



Lorsque M-DEX est connecté à votre téléphone portable, vous avez accès aux fonctionnalités suivantes :

1. Accepter ou rejeter l'appel
2. Terminer l'appel
3. Transférer l'appel
4. Appeler
5. Fonctionnement mains libres

ACCEPTER OU REJETER L'APPEL

Lorsque vous recevrez un appel, vous entendrez la sonnerie de votre téléphone portable, et si le M-DEX est à portée de vos aides auditives, il émettra également une tonalité. Vous pouvez accepter ou rejeter l'appel en sélectionnant « Oui » ou « Non ».



TERMINER L'APPEL

Pour terminer un appel

Appuyez sur **Terminer**

APPELER

Pour appeler

Entrez le numéro de téléphone sur votre téléphone portable et utilisez le M-DEX comme nous le décrivons à la page 28.

UTILISER LA LISTE D'APPELS POUR APPELER

Pour appeler un des cinq derniers numéros enregistrés dans la liste d'appels :

LISTE D'APPELS	
→	+452233445566
←	+451122334455
→	+453344556677
←	+454455667788
→	+455566778899

Appuyez sur la touche **Oui**

Utilisez la touche ▲ ou ▼
pour choisir le numéro
souhaité.

Appuyez sur la touche **Oui**.


Les flèches indiquent s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant.

Pour quitter la liste d'appels :

Appuyez sur la touche **Non**.

TRANSFÉRER L'APPEL


La fonctionnalité de transfert vous permet de transférer de nouveau l'appel vers le téléphone portable.

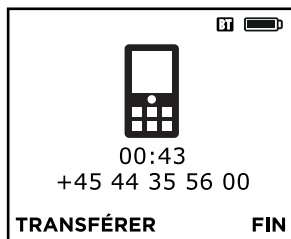

Pour transférer un appel vers le téléphone portable


Appuyez sur **Transférer** → **Oui**

Une marque confirme votre choix.

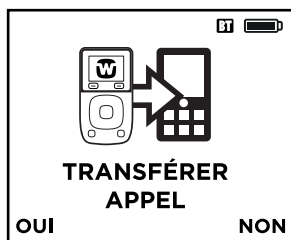

Le fait d'éteindre votre M-DEX transférera également de nouveau l'appel vers le téléphone portable.

FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES

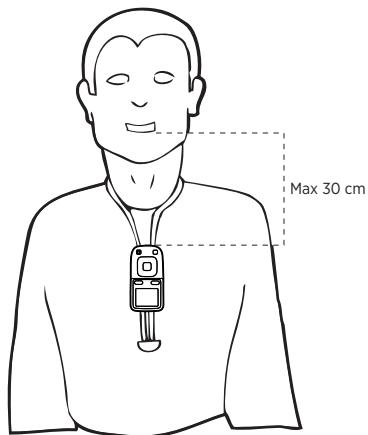

Pour un fonctionnement mains libres, passez le M-DEX autour de votre cou et parlez dans son microphone.

AUTRES FONCTIONS

COMMENT REGLER LE VOLUME ?

Vous pouvez régler le volume pendant une conversation téléphonique.

Pour accéder aux barres de volume

Appuyez sur ▲ ou sur ▼

Pour augmenter ou baisser le volume

Appuyez sur ▲ ou sur ▼

PIÈCE ARRÊT

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Pièce arrêt pendant les conversations téléphoniques. Voir page 23.

FONCTIONNALITES AVANCÉES

Vous pouvez accéder aux fonctions avancées suivantes en appuyant sur la touche **Menu** ou en utilisant ◀ ou ▶:

Si vous utilisez ▶, les éléments du menu sont placés dans l'ordre suivant :


1. Bluetooth *
2. Entrée audio*
3. Volume D/G
4. M-DEX T *
5. Réglages

Les choix que vous aurez faits aux options 1, 2 et 5 seront confirmés par une marque.


Etant donné que les éléments 1, 2 et 4 impliquent la transmission du son, celui de vos aides auditives sera affecté chaque fois que vous confirmerez un choix dans ces options. Lorsque vous quitterez ces fonctionnalités, vous retournerez au programme 1.

* *Le M-DEX doit se trouver dans un rayon de 50 cm des aides auditives.*

BLUETOOTH

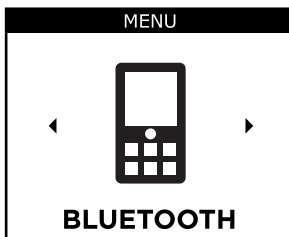

Le menu Bluetooth est uniquement disponible (indiqué par une couleur bleue) si le Bluetooth est activé dans votre M-DEX et qu'il est connecté à un appareil Bluetooth. Sinon il sera grisé.

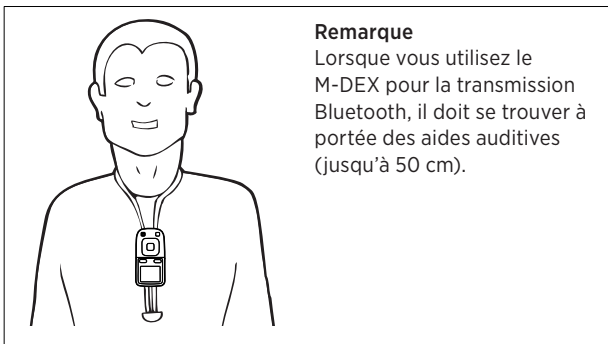

Remarque

Lorsque vous utilisez le M-DEX pour la transmission Bluetooth, il doit se trouver à portée des aides auditives (jusqu'à 50 cm).

Pour démarrer la transmission :

Appuyez sur la touche **Menu**. Sur certains systèmes audio personnels, par exemple les téléphones, le lecteur de musique doit être activé avant de pouvoir passer de la musique. Avec le réglage par défaut de Bluetooth, l'aide auditive accentue la musique. Pour l'optimiser pour la parole, utilisez ◀ ou ▶.



Pour confirmer un nouveau réglage

Appuyez sur la touche **Menu**

Pour quitter Bluetooth


Appuyez sur **Non** → **Non**

ENTRÉE AUDIO

Cette fonctionnalité peut vous servir si vous voulez écouter une source audio externe comme un lecteur mp3. Lorsque vous connecterez une prise jack à l'entrée audio, l'écran Entrée audio s'affichera automatiquement.



Le menu Entrée audio est uniquement disponible (indiqué par une couleur bleue) si le M-DEX et la source audio sont connectés par un câble jack/jack.

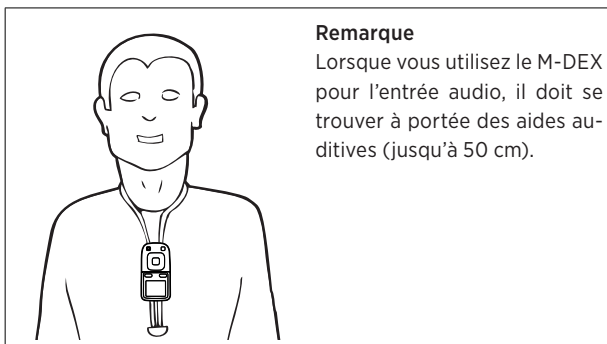

Remarque

Lorsque vous utilisez le M-DEX pour l'entrée audio, il doit se trouver à portée des aides auditives (jusqu'à 50 cm).

Pour démarrer la transmission :

Appuyez sur Menu. Avec le réglage par défaut de l'entrée audio, l'aide auditive est optimisée pour l'écoute de la musique. Pour l'optimiser pour la parole, utilisez ◀ ou ▶.



Pour confirmer un nouveau réglage


Appuyez sur la touche Menu

Pour quitter Entrée audio


Appuyez sur Non → Non

VOLUME D/G

Utilisez cette fonctionnalité si vous voulez régler le volume des deux aides auditives séparément.

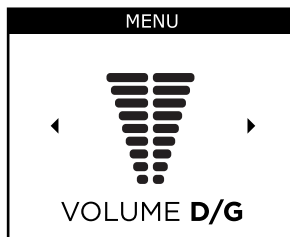


Appuyez sur la touche **Menu**

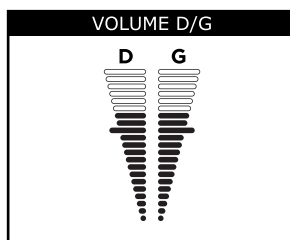


Pour sélectionner l'aide auditive dont vous voulez régler le volume

Utilisez ◀ ou ▶ pour choisir droite ou gauche, respectivement.

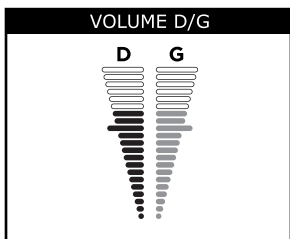

Pour augmenter et
baisser le volume
Utilisez ▲ ou ▼

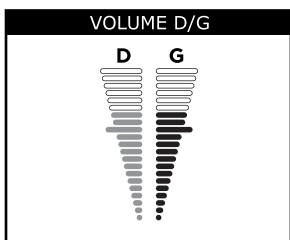


Pour quitter le volume G/D
Appuyez sur **Non** → **Non**

Lorsque vous quittez cet écran animé, le volume des aides auditives devra être réglé au niveau par défaut.


M-DEX T

Cette option vous permet de tirer profit des systèmes à boucle magnétique même si vos aides auditives ne possèdent pas de bobine téléphonique. Si votre aide auditive possède un programme avec bobine téléphonique, nous vous recommandons de l'utiliser pour une performance optimale.

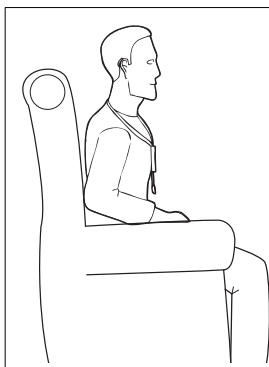

Utilisation de la bobine téléphonique dans le M-DEX

Pour permettre au M-DEX de capter les signaux de la boucle magnétique, il doit être suspendu en position verticale et être à portée des aides auditives. (Jusqu'à 50 cm).

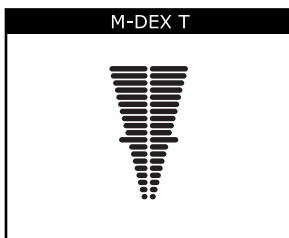


**Pour changer le volume
depuis l'écran M-DEX T**

Appuyez sur **Menu**
et ▲ ou ▼

Pour quitter M-DEX T


Appuyez sur **Non → Non**

LES RÉGLAGES

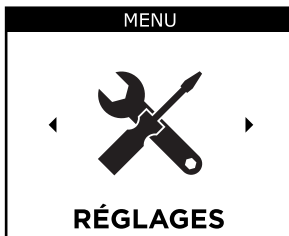

Appuyer sur la touche **Menu** vous donne accès aux éléments suivants du menu :

1. Réglages Bluetooth
2. Verrouillage automatique du clavier
3. Vibreur
4. Réinitialiser Bluetooth
5. Enregistrement d'événement à court terme
6. Réinitialiser

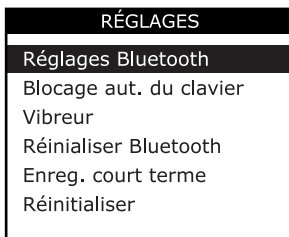

Pour sélectionner un élément du menu

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour aller à l'élément souhaité.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner un élément

Réglages Bluetooth

Vous pouvez y activer ou désactiver le Bluetooth en utilisant la touche **Menu**.



Vous pouvez également effectuer un appairage Bluetooth.

Appairage Bluetooth

Voir page 24.

Pour retourner au menu

Appuyez sur **Non**.

Remarque

Veillez noter que l'utilisation du M-DEX et du téléphone portable avec le Bluetooth activé augmentera la consommation de la pile.

Verrouillage automatique du clavier

Cette fonctionnalité évite que vous appuyiez accidentellement sur une touche, par exemple si le M-DEX se trouve dans la poche de votre vêtement.

Si cette fonctionnalité a été activée, les touches du M-DEX seront automatiquement verrouillées lorsque l'écran entrera en mode veille.



Pour activer ou désactiver le verrouillage automatique du clavier
Appuyez sur **Menu**

Pour retourner au Menu


Appuyez sur **Non**

Pour déverrouiller le verrouillage automatique du clavier

Appuyez sur **Non → Menu**

Vibreur

Si vous avez choisi un profil Silencieux dans votre téléphone portable, le vibreur vous avertira lorsque vous recevrez un appel.

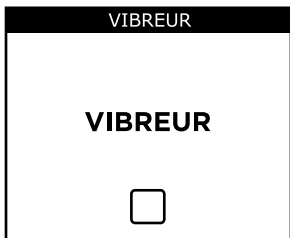

Pour activer ou désactiver le vibreur

Appuyez sur la touche Menu

Pour retourner au Menu

Appuyez sur **Non**

Réinitialiser le Bluetooth

Cette fonctionnalité vous permet de supprimer les appairages Bluetooth précédents. Cela peut être nécessaire si vous changez de téléphone portable.

Pour sélectionner Réinitialiser Bluetooth


Appuyez sur **Menu**

Pour retourner au Menu

Appuyez sur **Non**


Enregistrement d'événement à court terme

Si vous rencontrez des difficultés dans une situation d'écoute spécifique, cette fonctionnalité vous permet de faire un enregistrement d'une minute de cette situation. Cela peut aider votre audioprothésiste à effectuer un réglage fin de vos aides auditives.

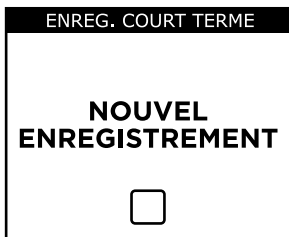


Pour démarrer l'enregistrement

Appuyez sur la touche Menu

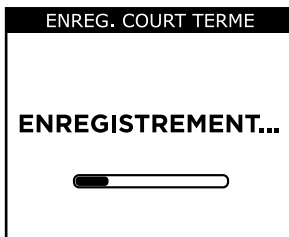

Le processus d'enregistrement dure une minute et ne peut pas être interrompu. Vous pouvez suivre la progression sur l'écran.

Veillez noter que si vous démarrez un nouvel enregistrement, l'enregistrement précédent sera supprimé.

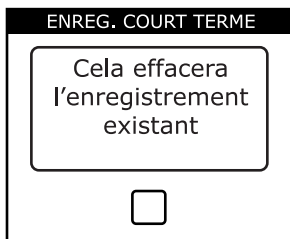

Pour retourner au Menu

Appuyez sur **Non**

RÉINITIALISER

Cette fonctionnalité réinitialise les réglages à : volume par défaut, verrouillage automatique du clavier, vibreur désactivé.



Pour réinitialiser les réglages et le volume à leur valeur par défaut
Appuyez sur **Menu**

Pour réinitialiser les réglages Bluetooth, voir page 46.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Cause possible	Solution
Votre M-DEX ne fonctionne pas	La batterie est épuisée	Recharger la batterie (voir page 11)
L'écran affiche « Veuillez appairer aux aides auditives »	Le M-DEX n'est pas appairé à vos aides auditives	Contactez votre audioprothésiste
Pas de streaming Bluetooth de la musique sur téléphone lorsque vous activez le Bluetooth sur M-DEX	Sur certains systèmes audio personnels, le lecteur de musique doit être activé avant de pouvoir passer de la musique	Veillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'informations
M-DEX ne vibre pas lorsque le téléphone sonne	Vibreur non actif dans M-DEX	La fonctionnalité du vibreur est activée sous Réglages
L'icône BT dans M-DEX est bleue mais il n'y a pas de connexion au téléphone	M-DEX a été appairé avec un autre appareil et a établi un contact avec lui	Désactivez le BT sur l'appareil actif ou ré-initialisez les réglages Bluetooth, puis appairez de nouveau le téléphone

Problème	Cause possible	Solution
Votre M-DEX est allumé, mais l'écran est noir	Le verrouillage du clavier est activé	Appuyez sur Non > Menu
Le son du Bluetooth/jack trop faible et/ou bruyant	L'intensité du son n'est pas suffisamment élevée	Augmentez le volume de l'appareil connecté au M-DEX et baissez le volume du M-DEX à un niveau convenable
M-DEX prend du temps à charger ou ne se charge pas du tout	Le chargeur utilisé n'est pas le bon	Utilisez le chargeur fourni avec votre M-DEX
Le programme affiché dans M-DEX n'est pas le même que dans l'aide auditive	M-DEX et l'aide auditive ne sont pas appairés correctement	Demandez à votre audioprothésiste de les appairer de nouveau
L'écran d'appel entrant s'affiche mais la sonnerie du téléphone ne sonne pas dans les aides auditives	Certains téléphones n'émettent pas de sonnerie dans les aides auditives si le téléphone est réglé sur silencieux	Désactivez la fonctionnalité silencieuse de votre téléphone portable
	Le M-DEX n'est pas à portée	Déplacez-le au sein de la portée (jusqu'à 50 cm)

Problème	Cause possible	Solution
Lorsque vous appuyez sur une touche du téléphone, les aides auditives bipent et changent de programme	Certains téléphones envoient des tonalités de pavé numérique au M-DEX	Désactivez la tonalité du pavé numérique sur le téléphone
L'appairage Bluetooth ne fonctionne pas		Réinitialisez Bluetooth sous Réglages et faites un nouvel appairage
Aucun son lorsque vous écoutez en audio	M-DEX n'est pas à portée des aides auditives	Glissez le M-DEX vers le haut du cordon

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE M-DEX ?

Le M-DEX est un objet précieux et doit être manipulé avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront d'en prolonger la durée de vie :



AVERTISSEMENT

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à une forte humidité.
- Ne le plongez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne portez pas votre M-DEX sur vous lors d'une radiographie, d'une IRM ou de traitements par rayonnements, et ne le mettez jamais dans un four à micro-ondes. Ces types de rayonnements peuvent endommager votre appareil. Les rayonnements du matériel de salles de surveillance, les alarmes anti-vol, les téléphones portables et sources semblables sont plus faibles et n'endommageront pas l'appareil. Cependant, de temps à autre, le rayonnement d'appareils comme certaines alarmes anti-vol, les détecteurs de mouvements automatiques et d'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences audibles sensibles pendant l'utilisation du M-DEX et de l'aide auditive.



MISE EN GARDE

- Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. (Cela doit uniquement être fait par du personnel habilité).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. Ne le nettoyez jamais avec de l'eau, des produits de nettoyage ou d'autres solvants.
- Evitez de faire tomber le M-DEX.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Tenez le M-DEX, ses composants et ses accessoires hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler des composants de l'appareil ou de se blesser à son contact. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil à bord d'un avion ou dans les hôpitaux sans permission.
- N'utilisez pas l'appareil dans des mines ou d'autres lieux contenant des gaz explosifs.
- Si vous portez votre M-DEX autour du cou, vérifiez que la boucle de fermeture du cordon est toujours placée sur votre nuque.
- L'appareil est en matière moderne anallergique. Cependant, dans de rares cas, son contact peut provoquer une irritation cutanée. Si vous souffrez d'une telle irritation, veuillez contacter votre audioprothésiste.



MISE EN GARDE

- Bien que l'appareil ait été conçu conformément aux standards internationaux de compatibilité électromagnétique les plus stricts, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.

AVERTISSEMENT DE SECURITE

Cet appareil est alimenté par une alimentation électrique externe.

- Ne connectez le M-DEX qu'à une alimentation électrique compatible.
- L'alimentation électrique doit avoir une puissance de 5VDC, 500mA et doit posséder une mini fiche USB.
- La puissance de la tension de l'alimentation électrique doit correspondre à la tension du réseau de votre pays et la source d'alimentation électrique doit posséder une prise mâle pour réseau qui est compatible avec les prises murales CA de votre pays.
- La source d'alimentation électrique doit être conçue pour appareils intra-auriculaires et doit avoir les marques de certification indiquant la certification par une agence approuvée de votre région.

Widex vous recommande fortement de toujours utiliser une source d'alimentation électrique fournie par votre distributeur Widex afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre M-DEX.

REGULATORY INFORMATION



Hereby, Widex A/S declares that this M-DEX is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at: <http://www.widex.com>



Federal Communications Commission and Industry Canada Statement

FCC ID: TTY-M-DEX

FCC ID: TTY092802

IC: 5676B-M-DEX

IC: 5676B-092802

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

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
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.



Vous ne devez pas jeter les aides auditives, les accessoires et les piles dans les ordures ménagères ordinaires. Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de vous débarrasser, comme il se doit, de ces objets.



CE 0459

Fabricant

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2010-12
9 514 0129 003 #01